

DIXION SAFETEST



Scannen Sie den Code für die Schritt-für-Schritt Videoanleitung

Testen Sie sich zu Hause,
auf der Reise,
bei der Arbeit.
Schützen Sie sich
und Ihre Familie!

KONTAKT

DIXION Vertrieb medizinischer Geräte GmbH
Couvenstr. 6, 40211 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 211 749583132
www.dixon.de
info@dixon.de

DIXION

DIXION SAFETEST SARS-CoV-2 Antigen-Speichel-Schnelltest zur Selbstanwendung

Der DIXION SafeTest dient zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in Sputum (Speichel im hinteren Rachenraum).

Der Test basiert auf der Antigen-Antikörper-Reaktion und der Immunochromatographie.

Einfache Anwendung mittels nur einer Speichelprobe und nicht des komplizierten Abstrichs aus dem Nasenrachenraum. Die Probenentnahme ist nichtinvasiv, kein tiefes Eindringen in den Nasenrachenraum mehr notwendig und für Sie angenehmer, schonender und einfacher.



www.saftetest24.de
info@saftetest24.de

VORTEILE AUF EINEN BLICK



Einfache Anwendung

Dieser Test ist einfach durchzuführen. Er erfordert keine fachspezifischen Kenntnisse und keine zusätzliche Ausrüstung.



Schnelles Ergebnis

Das Ergebnis ist innerhalb von 10 Minuten verfügbar.



Nichtinvasiv

Das Testverfahren beseitigt unangenehme und manchmal schmerzhaft abstriche aus dem Nasopharynx.



Kinderleichte Durchführung

Einfache Handhabung – Komfort durch Selbsttest. Während des Tests ist die Hilfe anderer Familienmitglieder nicht notwendig.




Hohe Genauigkeit

Durch die hohe Zuverlässigkeit des Tests können Sie Ihren Infektionsstatus mit hoher Genauigkeit ermitteln.

HANDHABUNG - IN 3 SCHRITTEN ZUM ERGEBNIS

1. Probe entnehmen


Öffnen Sie die Abdeckung des Sammelröhrchens und schrauben Sie den Speicheltrichter drauf. Sammeln Sie 2ml vom Speichel aus der tiefen Kehle (im Sammelröhrchen ist bereits 2ml Lösung enthalten). Entfernen Sie den Speicheltrichter. Schließen Sie das Röhrchen und schütteln Sie es kräftig kopfüber 6 bis 10-mal.

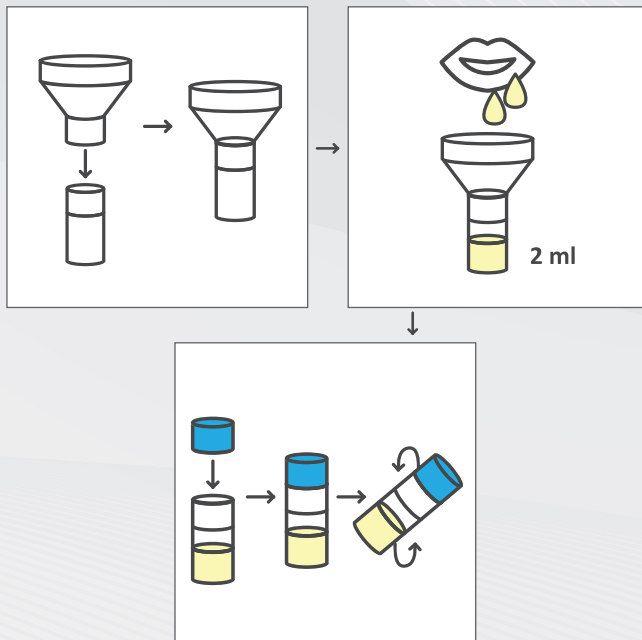

2. Gelöste Probe auftragen



Öffnen Sie den Deckel, lassen Sie das Röhrchen 10 Sekunden lang stehen und entnehmen Sie anschließend die Flüssigkeit aus dem Röhrchen mit einer Pipette. Fügen Sie 3-4 Tropfen (ohne Bläschen und mit 3-Sekunden-Intervall) in die Probenöffnung hinzu und warten Sie bis der lilafarbene Streifen angezeigt wird.

DIXION

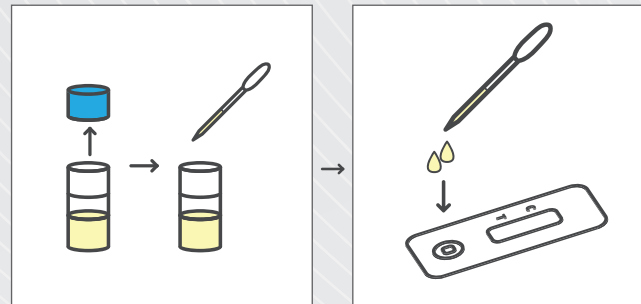

3. Ergebnis ablesen


Die Testergebnisse sollten innerhalb von 10-15 Minuten abgelesen werden.

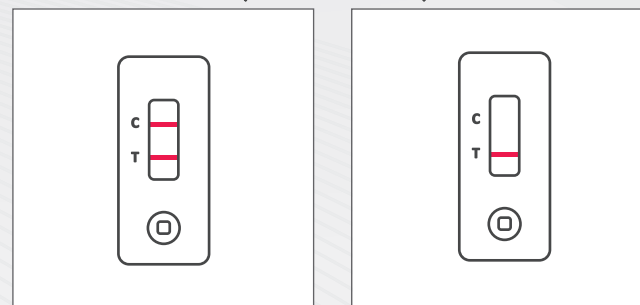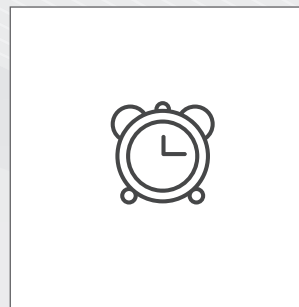

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage.

TESTERGEBNISSE RICHTIG INTERPRETIEREN

Kontrolllinie →
Testlinie →

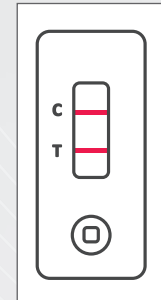


Positiv

Es erscheint eine lilafarbene Linie sowohl im Kontrolllinienbereich (C) als auch im Testlinienbereich (T).

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich an COVID-19 infiziert sind.

Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt/ Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt.

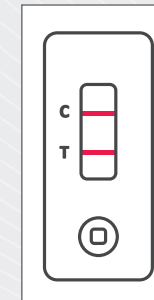


Negativ

Es erscheint nur eine lilafarbene Linie im Kontrolllinienbereich (C).

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie an COVID-19 infiziert sind.

Auch bei einem negativen Testergebnis kann eine Infektion vorliegen. Im Verdachtsfall wird empfohlen, den Test nach 1-2 Tagen zu wiederholen.

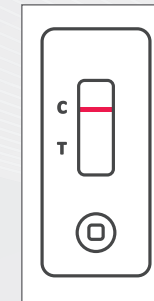

Ungültig

Es erscheint eine lilafarbene Linie im Testlinienbereich (T) oder es erscheint keine lilafarbene Linie im Kontrolllinienbereich (C) als Hinweis darauf, dass der Test nicht korrekt durchgeführt wurde oder die Testkassette fehlerhaft ist. In diesem Fall sollte der Test erneut mit einer neuen Testkassette durchgeführt werden.

